

# M3 Freude an moderner Verbindung

Handbuch

#### Sicherheitsmaßnahmen:

Das Gerät erfüllt folgende Normen:

Verordnung des Ministers für Wirtschaft, Arbeit und Sozialpolitik vom 12. März 2003 über grundlegende Anforderungen für elektrische Geräte (Polnisches Gesetzesblatt vom 12. März 2003 Nr. 49, Pos. 414) (LDV Richtlinie 73/23/EWG + 93/68/EWG)

Verordnung des Infrastrukturministers vom 2. April 2003 über Übereinstimmungsprüfungen von Geräten gegenüber den grundlegenden Anforderungen für elektromagnetische Kompabilitätsrichtlinien und über Verfahren zu deren Kennzeichnung (Polnisches Gesetzesblatt Nr. 90, Pos. 848) (EMC Richtlinie 89/336/EWG + 92/31/EWG + 93/68/EWG).

Besonders unter Einhaltung der folgenden Normen:

BS-EN 55014-1 (September 2002) Emission von elektromagnetischen Störungen

BS-EN 55014-2 (Juli1999) elektromagnetische Verträglichkeit

BS-EN 60335-1 (September 2002) Benutzersicherheit von elektrischen Haushaltsgeräten und ähnlichen Geräten

BS-EN 60335-2-32 (2002) Besondere Anforderungen von Massagegeräten

BS-EN 60335-2-23 (Februar 2001) Arbeitsschutzvorrichtungen, spezifische Anforderungen für Geräte für Haut- und Haarpflege

BS-EN 60335-2-23/A1 (2002) Änderung A1 2002

BS-EN 60355-2-23/A1 (2004) Änderung A1 2004

Da es eine relativ starke Stromstärke braucht, um einen leistungsfähigen elektrischen Generator zu erschaffen, gab es ein Problem mit der Gerätesicherheit und den Auswirkungen auf den Nutzer.

Der Einfluss des elektromagnetischen Feldes auf Menschen wurde gründlich getestet und angemessene Standards sowie eine akzeptable Feldstärke für die Sicherheit für Menschen eingesetzt

- (BS) PN-T-06580-1:2002
- (BS) PN-T-06580-3:2002
- (BS) PN-EN 62226-1:2008
- (BS) PN-EN 62226-2-1:2005
- (BS) PN-EN 62226-3-1:2008

#### Achtung!

Dieses Anweisungen gelten nur für den Gebrauch des M3-Geräts.

Es handelt sich auf keinen Fall um eine Anleitung für Behandlungsmethoden.

Enthaltene Informationen zu Behandlungen, Kontraindikationen und Indikationen dienen als zusätzliche Informationen. Das M3-Gerät ist nur für den professsionellen Gebrauch mit entsprechender Ausbildung gedacht. Das Gerät ist kein medizinischer Apparat und nicht für die Diagnose und Behandlung von Krankheiten geeignet. Wenn Ihr Kunde/Ihre Kundin nicht sicher ist, ob er/sie sich einer Behandlung unterziehen kann, sollte er/sie einen Arzt aufsuchen.

# DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR FALSCH AUSGEFÜHRTE BEHANDLUNGEN SOWIE SCHÄDEN, DIE DURCH UNSACHGEMÄßE GERÄTEVERWENDUNG VERURSACHT WERDEN.

Um das Gerät richtig gebrauchen bzw. einsetzen zu können, müssen Sie dieses Handbuch gründlich lesen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf, um zukünftig darauf zurückgreifen zu können. Lesen Sie das Handbuch aufmerksam und folgen Sie den enthalten Anweisungen. Denken Sie daran, dass Nichteinhaltung der Empfehlungen Ihr Recht auf Gewährleistung verletzt.

#### Warnung!

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Es ist mit der Hauptstromversorgung verbunden und enthält gefährliche elektrische Spannung im Inneren. Eine Beschädigung am Kabel oder Gehäuse kann zum Elektroschock führen oder Feuer verursachen. Jede Art von sichtbaren Schäden muss sofort der Reparaturwerkstatt gemeldete werden.

Benutzen Sie ein geerdetes Kabel, um das Gerät mit Strom zu versorgen.

Schützen Sie das Gerät vor Wasser und Feuchtigkeit, um Schaden, Elektroschock oder Feuer zu vermeiden. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badezimmern, Wasserhähnen oder anderen potentiellen Wassersprenklern.

Verdecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen am Boden des Gerätes. Stellen Sie das Gerät nicht auf haarige Teppiche, da dies die Zirkulation des Kühlungssystems des Gerätes beeinträchtigen kann.

Warnung vor Allergien gegen Metalle!

Vor jeder Behandlung befragen Sie die Person zu Allergien gegen Metalle wie z.B. Nickel, Chrom, Aluminium. Im Falle von positiven Anzeichen für eine Allergie gegen die genannten Metalle, führen Sie die Behandlung nicht durch!

#### TECHNISCHE DATEN:

- 1. Voltzahl 230V, 50Hz
- 2. max. Leistungsaufnahme/Stromverbrauch 620W (120W + 500W)
- 3. elektrische Sicherungen 2x T 1A, 2x T 3,15A

# Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsmaßnahmen
Inhaltsverzeichnis & Glossar
Verbindung
Kavitationspeeling
Dermo Massage 5
Dermo Massage (Behandlungstechniken) 6
Ultraschall-Fettabsaugung
Ultraschall-Fettabsaugung (Behandlungstechniken) 8
Hochfrequenz/Radiowellen9
Hochfrequenz (Behandlungstechniken)10
Oxybrasion11
Nadelfreie Mesotherapie12
Nadelfreie Mesotherapie (Abschnittsdetails)13
Ultraschall14
Diamant Mikrodermabrasion15
Diamant Mikrodermabrasion (Vorbereitung der Haut)16
Skinic

# Glossar

**WI-FI** ist eine kabellose Netzwerk-Technologie, die es Computern und anderen Geräten erlaubt über ein kabelloses Signal zu kommunizieren. Sie kann mit einer Netzwerk-Quelle wie dem Internet verbunden werden.

**ACCESS POINT (ZugangspunktI,** ein kabelloser Zugangspunkt (AP). Dies ist eine Vorrichtung, die kabellosen Geräten ermöglicht, sich mit einem verkabelten Netzwerk zu verbinden, indem WI-FI benutzt wird.


Der AP verbindet sich gewöhnlich mit einem Router (durch ein verkabeltes Netzwerk) als eigenständiges Gerät, aber er kann auch ein integraler Bestandteil des Routers selbst sein.

ETHERNET (Kabelnetzwerk) ist die am meisten verbreitete Art der Verbindung, die Geräte in einem lokalen Netz (LAN) nutzen. Ein Ethernet- Anschluss (Port) sieht einem normalen Telefonstecker sehr ähnlich, aber ist etwas weiter. Dieser Anschluss kann genutzt werden, um Ihr Gerät mit einem lokalen Netzwerk zu verbinden.

# Verbindung

Vorbereitung zum Gebrauch des Geräts


- 1. Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile Oberfläche.
- 2. Stecken Sie das Netzkabel in das Gerät.
- 3. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.
- 4. Schalten Sie das Gerät ein.

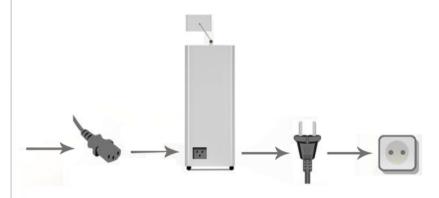


# Verbindung des Geräts mit dem Internet

Es gibt 3 Arten M3 mit dem Internet zu verbinden.

- 1. mit ETHERNET
- a. Stecken Sie das Ethernet-Kabel in den Ethernet-Anschluss.

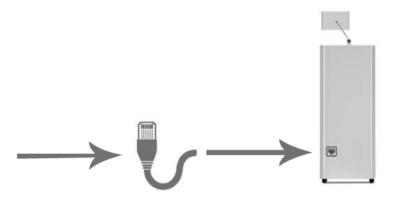

- 2. mit WIFI (WPS)
- a. Klicken Sie dreimal auf das Bildzeichen in der linken unteren Ecke des Bildschirms.
- b. Klicken Sie "OK" auf dem Bildschirm des M3-Geräts.
- c. Klicken Sie den "WPS"-Knopf an Ihrem Router.
- d. Warten Sie auf die Verbindung mit Ihrem Netzwerk.
- e. Klicken Sie "OK" auf dem Bildschirm, um die Verbindung zu sichern, wenn sie erfolgreich ist.

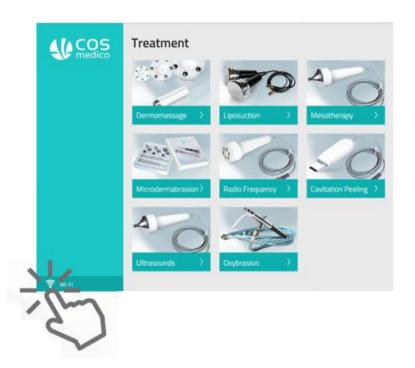

- 3. mit WIFI Access Point (Zugangspunkt)
- a. Klicken Sie fünfmal auf das Bildzeichen in der linken unteren Ecke des Bildschirms.
- b. Klicken Sie "OK" auf dem Bildschirm des M3-Geräts.
- c. Finden Sie ein neues Netzwerk auf Ihrem Smartphone mit dem Namen "reactify-setup" und stellen Sie die Verbindung her, indem Sie das Passwort "let-me-in" benutzen.
- d. Öffnen Sie http://setup.me in Ihrem Smartphone-Browser und folgen Sie den Anweisungen.

# Kavitationspeeling

#### Technische Daten:

Schwingungszahl: 25 kHzPulsierungsfrequenz: 1-50 Hz

- Arbeitszeit: 5-60min

Eine Behandlung mit dem Kavitationspeeling sollte in den folgenden Fällen auf keinen Fall durchgeführt werden:

- hoher Blutdruck, Blutgerinnungsstörungen
- Venenentzündung, Herzrhythmusstörungen, Krampfadern
- akute und entzündliche Infektionen
- Diabetes
- psychische Erkrankung
- Krebs
- aktive pulmonale Tuberkulose
- Schrittmacher
- Vorhandensein von metallischen Objekten im Gewebe
- nicht vollendetes Knochenwachstum (ungefähres Alter: 21)
- Stadium nach Strahlentherapie
- Schwangerschatft

# Köpfe/Aufsätze




Der Spachtel wird für das Kavitationspeeling und die Kavitations-Sonophorese benutzt.

Die passive Elektrode schließt den Kreislauf für den galvanischen Strom.



# ERINNERUNG:

Vorsicht beim Umgang mit dem Gerät in Augen- , Gehirn.- und Bauchorganennähe. Jede Entzündung der Bauchorgane ist eine absolute Kontraindikation für die Verwendung von Super Sonic an der Bauchhülle.

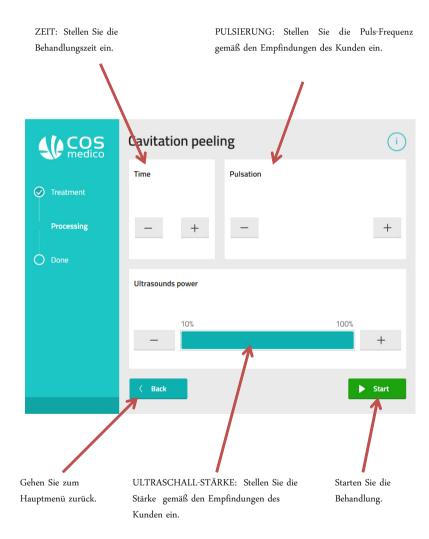

# Dermo Massage

Technische Daten:

- max. Durchlauf :17 l/min

- Vakuum -60KPa

- Arbeitszeit: 5-60 min

- Das Gerät ist für den durchgehenden Gebrauch bestimmt.

Eine Behandlung mit der Dermo Massage sollte in den folgenden Fällen auf keinen Fall durchgeführt werden:

- Hautenzündungen

- Hautschäden

- Neigung zu Blutungen und der Entstehung von Blutergüssen (blaue Flecke)

- rissige Blutgefäße

- Herzinsuffizienz

- Fieber, Schwäche

- Hypertonie

- Schwangerschaft

- Krebs

# Köpfe/Aufsätze



Kopf für Bauch und Arme



Kopf für Oberschenkel und Gesäß

Kopf für Oberschenkel und Gesäß



# Bedienungsfeld:


Wählen Sie "Dermomassage" vom Hauptmenü.

ZEIT: Stellen Sie die Behandlungszeit

Gehen Sie zum Hauptmenü zurück.

PUMP-STÄRKE: Erhöhen oder vermindern Sie die Vakuum-Stärke.

Starten Sie die Behandlung.

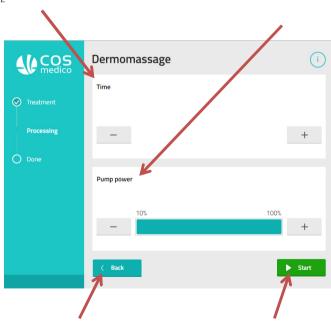


# EMPFOHLENE BEHANDLUNSTECHNIKEN

# Oberschenkel

Spiral-, Zick-Zack- und Drainagebewegungen durchführen, und zwar hin und her






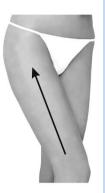

# Bauch

Bewegungen am Bauch vom Nabel weg ausführen, zusätzlich einfache Drainagebewegungen Richtung Leistenbeuge



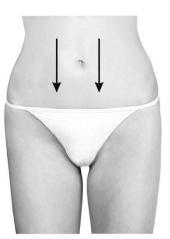

#### Gesäß

Spiral-, Zick-Zack- und Drainagebewegungen durchführen, von der Gesäßfalte weg.







# Die Entwicklung/Behandlung von Narben und Dehnungsstreifen

Halten Sie die Haut mit der Hand an der zu überarbeitenden Körperpartie fest und vollführen Sie Kreisbewegungen an der Narbe oder an den Dehnungsstreifen. Beachten Sie Vakuum und örtliche Stauungen. Wiederholen Sie diesen Schritt entlang der Narbe bzw. an allen Stellen, an denen Dehnungsstreifen vorhanden sind.

#### Desinfektion:

Nach jeder Anwendung reinigen sie bitte die Köpfe, Schlauch und Filter von etwaigen Rückständen. Verwenden Sie bitte ein entsprechendes chemisches Desinfektionsmittel. Externe Filter können mit Desinfektionsflüssigkeit aufgefüllt werden und dann gereinigt werden durch Ausspülen.

#### Achtung!

Während der Arbeitsabläufe auf der Haut sollten sie ein Gleitvorbereitung oder Massageölvorbehandlung vornehmen und die Reinigung/Sauberkeit der Gerätekomponenten im Blick behalten. Etwaige Massageöle sollte langsam-trocknend bzw. langsam einwirkend sein, um eine längerwährende Gleitfunktion auf der Haut zu gewährleisten. Halten Sie den Behandlungskopf in Bewegung, denn ein Verweilen auf einer Hautstelle kann zu örtlichen Prellungen, Stauungen oder Blutergüssen führen.

# Ultraschall-Fettabsaugung

Technische Daten:

- Ultraschallschwingungen des Behandlungsstücks 1  $\rm MHz$
- und 30 kHz
- Pulsierungsfrequenz 1-50Hz
- maximale Temperatur des IR: 60 °C.

Eine Behandlung mit der Ultraschall-Fettabsaugung sollte in den folgenden Fällen auf keinen Fall durchgeführt werden:

- Schwangerschaft und Stillzeit
- Krebs (bis zu 5 Jahre nach der Behandlung)
- Herzinsuffizienz, Hypertonie
- virale und bakterielle Hauterkrankungen
- Fieber, Schwäche
- Osteoporose
- Fremdkörper, z.B. metallische Implantate im behandelten Bereich
- Epilepsie, Multiple Sklerose
- Menstruation
- Komplikationen bei Diabetes
- Herzklappe
- anormales Leberprofil

# Köpfe/Aufsätze



Ultraschall-Kopf - abgestrahlte Wellen von hoher Intensität.

Schalten Sie das Behandlungsprogramm aus, wenn Sie die Arbeit beenden. Ultraschallwellen können zum Beispiel Kopfschmerzen auslösen, wenn Sie sie woanders hinrichten.



Infrarot emittiert leichte Strahlung, Typ C. Daher benutzen Sie immer ein Kopplungsgel.

# Bedienfeld:


Wählen Sie "Liposuction" aus dem Hauptmenü.

ZEIT: Stellen Sie die Behandlungszeit ein.

Kehren Sie zum Hauptmenü zurück.

TEMPERATUR: Stellen Sie die Temperatur gemäß den Empfindungen des Kunden ein.

Starten Sie die Behandlung.

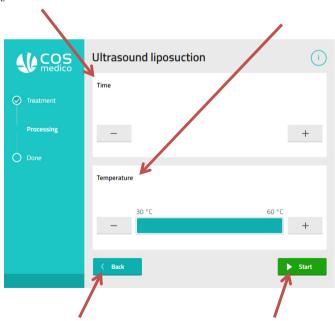

# EMPFOHLENE BEHANDLUNGSTECHNIKEN

Der Bereich, in dem die Behandlung durchgeführt wird, sollte doppelt so groß sein wie der Durchmesser des Kopfes bzw. des Behandlungsstücks. Der Durchmesser des Kopfes ist 8,5 cm, so dass der Behandlungsbereich etwa 17 cm sein muss. Wir fangen mit langsamen Bewegungen an. Nach Beenden des ersten Schritts der Behandlung, gehen Sie zum anderen Bereich über und führen den Rest der Prozedur durch.

WÄHREND DER BEHANDLUNG, MEIDEN SIE BEREICHE, IN DENEN KNOCHEN DIREKT UNTER DER HAUTOBERFLÄCHE LIEGEN UND ARBEITEN SIE NICHT IN DER NÄHE DES HERZENS UND DES RÜCKGRATS!

# Empfohlene Arbeitszeiten:

# ARME, jeder Arm:

- 10 Minuten Infrarot
- 10 Minuten Ultraschall

#### BAUCHBEREICH:

- 10 Minuten Infrarot
- 15 Minuten Ultraschall

# GESÄß:

- 15 Minuten Infrarot
- 20 Minuten Ultraschall

# OBERSCHENKEL, jede Seite:

- 10 Minuten Infrarot
- 10 Minuten Ultraschall

#### ERINNERUNG:

Sein Sie vorsichtig im Bauchbereich und führen Sie die Behandlung nicht aus, wenn:

- -Die Fettgewebsschicht weniger als 1,5 cm beträgt.
- -Der Kunde schwerwiegende Organerkrankungen hat: Leber Niere, Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse, Gallenblase etc.

# Hochfrequenz/Radiowellen

# Technische Daten:

- Frequenz des Hochfrequenz-Generators 1MHz
- Stärke 5-62W
- Arbeitszeit 5-60 min

Eine Behandlung mit Hochfrequenz sollte in den folgenden Fällen auf keinen Fall durchgeführt werden:

- -bakterielle Infektionen: Impetigo contagiosum (Eiterflechte), Staphylokokken, Sykose (Feigwarzenkrankheit)
- virale Infektionen: Warzen, Herpes, Molluscum contagiosum (Dellwarzen)
- Pilzinfektionen
- Phlegmonous acne (Akne)
- Krebs (bis zu 5 Jahre nach Ende der Behandlung)
- Schwangerschaft und Stillzeit
- Fieber und saisonale Infektionen
- Zerstörung der Sinne
- mentale Krankheiten
- Epilepsie
- Herzerkrankungen

# Köpfe/Aufsätze:



kleiner Kopf, für das Gesicht und die Augenpartie bestimmt



mittlerer Kopf, für die Schultern und den Bauchbereich bestimmt




großer Kopf, für die Oberschenkel und das Gesäß bestimmt

#### **ERINNERUNG**

Jede Art von Entzündungen der Bauchorgane ist eine absolute Kontraindikation für den Gebrauch von Radiowellen im Bauchbereich.

#### Bedienfeld:

Wählen Sie "Radio Frequency" aus dem Hauptmenü.

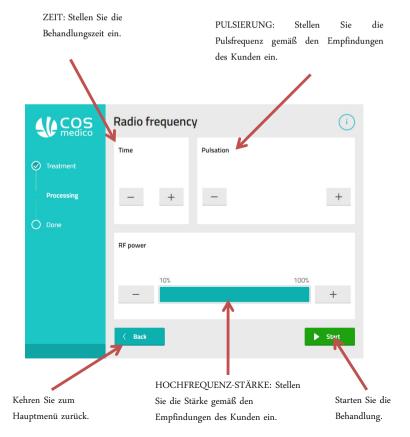

# EMPFOHLENE BEHANDLUNGSTECHNIKEN

# Die Richtungen des Arbeitskopfes (GESICHT):

- A. Lifting der Haut um den Mund
- B. Lifting der Wangenhaut
- C. Lifting der Haut um die Augen
- D. feine Falten auf der Stirn
- E. Beutel und dunkle Ringe unter den Augen

# Die Richtungen des Arbeitskopfes (KÖRPER):

# Bauch

- F. Bewegen Sie das Behandlungsstück gegen den Uhrzeigersinn.
- G. Bewegen Sie das Behandlungstück im Uhrzeigersinn.
- H. Bewegen Sie das Behandlungsstück auf und ab.

# Oberschenkel


I. Bewegen Sie das Behandlungsstück von innen nach außen.

#### Gesät


J. Bewegen Sie das Behandlungstück von innen nach außen und von unten nach oben. Brüste

K. Bewegen Sie das Behandlungsstück von unten nach oben.

# *GESÄß*

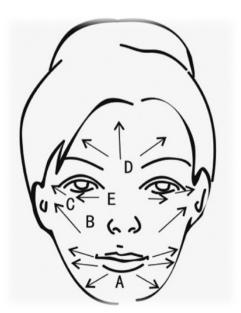

KÖRPER

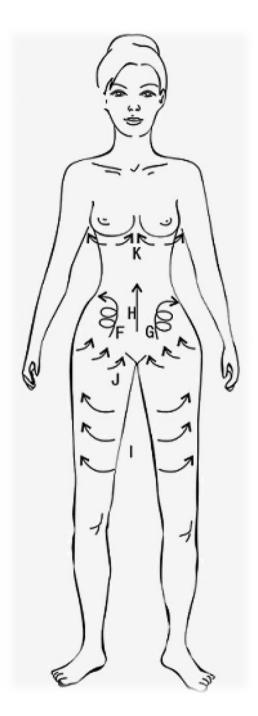

# Oxybrasion

#### Technische Daten:

- max. Druck 8 bar
- Arbeitszeit 5-60 min
- Geräusch 45 bB
- max. Fluss 70-100l/min
- Das Gerät ist für den durchgehenden Gebrauch bestimmt.

Eine Behandlung mit Oxybrasion sollte in den folgenden Fällen auf keinen Fall durchgeführt werden:

- eine durchgeführte Operation mit dem Gebrauch von Säuren
- eine Unterbrechung in der Beständigkeit der Epidermis
- Hautinfektionen (viral, bakteriell, durch Pilzbefall)
- Geschwulste/Tumore
- ernsthafte systemische Erkrankungen
- Schuppenflechte, in aktiver Phase
- entzündliche Hautzustände
- eiterbildende Veränderungen der Haut
- frische Narben
- Schwangerschaft, Stillzeit


# Köpfe/Aufsätze

# Spritzpistole





PHYSIOLOGISCHE SALINE ist eine Lösung von Natriumchlorid in Wasser mit einer Konzentration von 0,9% nach einer dehydrierten Sterilisation. Salz glättet und pflegt die Haut und reichert sie mit Sauerstoff an. Es stimuliert den Kreislauf in den Zellen und lässt kleine Hautveränderungen verschwinden. Es hat die Fähigkeit, die Haut zu durchdringen.

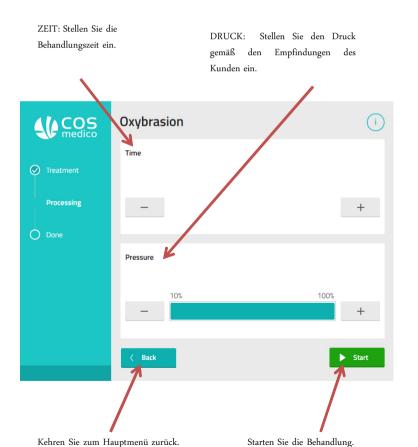

# Nadelfreie Mesotherapie

# Technische Daten:

- Betriebsdauer 1 40 minutes (schrittweise, alle 60 Sekunden)
- Ultraschallfrequenz: 1 MHz
- Leistung: 0,04 W/cm2 0,2 W/cm2
- -Strombereich: 0,2 mA 6,2 mA

Eine Behandlung mit der Nadelfreien Mesotherapie sollte in den folgenden Fällen auf keinen Fall durchgeführt werden:

- -2 Krebs
- -2 Schwangerschaft und Stillzeit
- -2 entzündliche Krankheiten: bakteriell, viral und durch Pilzbefall
- −2 mechanische Hautschäden
- -2 mangelhafte Durchblutung
- -2 Fieber, Schwäche und Auszehrung des Körpers
- −2 Osteoporose
- −2 Epilepsie
- -2 Allergie gegen die verwendeten Zutaten in den Produkten
- -2 Vorhandensein von metallischen Gegenständen und Implantaten im Behandlungsbereich
- Vorhandensein eines Herzschrittmachers, von kieferorthopädischen Klammern, Prothesen etc.

# Köpfe/Aufsätze:



Kopf (klein), empfohlen für die Augenregion



Kopf (groß), empfohlen für Gesicht und Körper



passive Elektroden, um den Kreislauf während der Behandlung zu schließen

#### Bedienfeld:

Wählen Sie "Mesotherapy" aus dem Hauptmenü.


Kehren Sie zum Hauptmenü zurück.

Wählen Sie das benötigte Programm.


Mesoterapy - choose program Eye Care ✓ Treatment Acne Rosacea **Choose program** Anti Age O Set current Hydration Processing Hair Care Anti-Age program increases blood circulation in the skin and causes collagen generation. Facial rejuvenation with Mesotherapy is ideal for anyone who wants to refresh Reduction of pain one's tired-looking face using a fast, non-surgical procedure. Discolorations

Beschreibung des Programms.

Starten Sie das gewählte Programm.

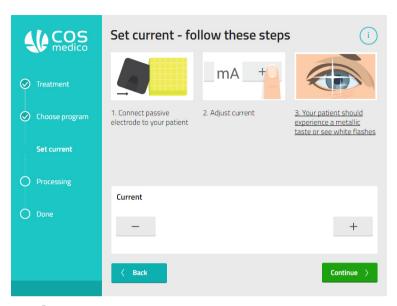

STROMSTÄRKE: Stellen Sie die Stromstärke gemäß den Empfindungen des Kunden ein.

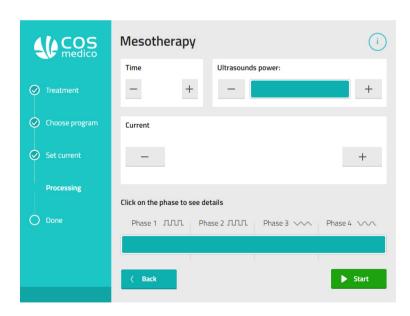

ZEIT: Stellen Sie die Behandlungszeit ein.

ULTRASCHALL-STÄRKE: Stellen Sie die Stärke gemäß den Empfindungen des Kunden ein.

#### Phasendetails

# Phase details



		Ultra	sounds	Current pulses		
Phase	Shape	Ultrasound pulsation	Pulsation duty	Positive pulse time [ms]	Negative pulse time [ms]	Interval between pulses [ms]
1	<b>ЛЛЛ</b> rectangular	off	100%	150	150	300
II	<b>ЛЛЛ</b> rectangular	1 Hz (1000 ms)	50%	30	30	60
III	triangular	1 Hz (1000 ms)	50%	50	50	50
IV	sine	off	100%	100	100	300

Phase I

Einführung der kosmetischen Inhaltsstoffe

Phase II

Kreislauf

Phase III

Drainage

Phase IV

Stimulation

#### **ERINNERUNG**

Die passive Elektrode ist ein wichtiger Bestandteil der Behandlung. Tauchen Sie sie in warmes Wasser für eine gute Leitfähgikeit. Die Elektrode kann mit einer Bandage am Arm befestigt werden.

# Ultraschall

# Technische Daten:

- Leistungsabgabe 0.04 2W/cm2
- regulierbare Stromstärke 0.2 mA 6.2 mA
- Ultraschallfrequenz 1MHz
- Arbetiszeit 5-60 min

Die Behandlung mit Ultraschall sollte in den folgenden Fällen auf keinen Fall durchgeführt werden:

- Bluthochdruck, Blutgerinnungsstörungen
- Venenentzündung, Herzrhythmusstörungen, Krampfadern
- akute Entzündungen und Infektionen
- Diabetes
- Krebs
- aktive pulmonale Tuberkulose
- Herzschrittmacher
- nicht beendetes Knochenwachstum (etwa 21 Jahre)
- Stadium nach einer Strahlentherapie
- Schwangerschaft

# Köpfe/Aufsätze:



kleiner Kopf, bestimmt für das Gesicht und die Augenpartie




mittlerer Kopft, bestimmt für die Schultern und den Bauchbereich

# ERINNERUNG!

Das Gerät kann im Verlauf von langer, harter Arbeit leicht warm werden. Nach Beenden der Behandlung und vor dem Start einer neuen, warten Sie 15 Minuten. Dies verlängert die Lebensdauer der Sender im Handgriff des Gerätes.

# Bedienfeld:

Wählen Sie "Radio Frequency" aus dem Hauptmenü.

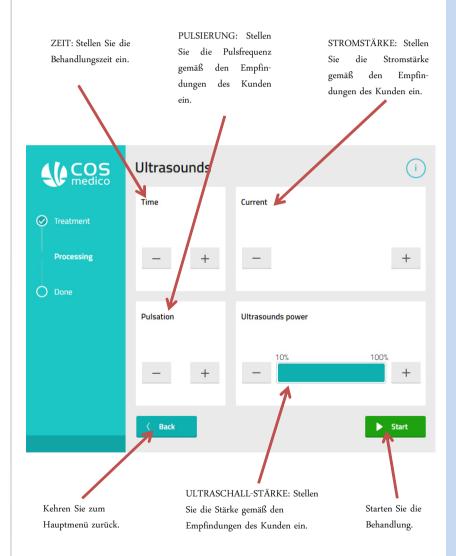

# Diamant Mikrodermabrasion

# Technische Daten:

- max. Fluss 17 l/min
- max. Vakuum, am Kopfende gemessen: -60kPa
- Arbeitszeit: 5-60min

Eine Behandlung mit der Diamant Mikrodermabrasion sollte in den folgenden Fällen auf keinen Fall durchgeführt werden:

- -bakterielle Infektionen (Impetigo contagiosa (Eiterflechte), Staphylokokken, Sykose (Feigwarzenkrankheit))
- virale Infektionen (Warzen, Herpes etc.)
- Pilzinfektionen
- tiefliegendes/höhlenreiches Hämangiom (Cavernous hemangioma)
- pustelige Akne (pustular acne, phlegmonous acne)
- Akne, Rosacea
- Verstümmelungen, Fleischwunden
- Beschädigung der Kontinuität der Haut
- Neigung zu Kolloiden
- Hautkrebs und Leberflecken
- Gesichtsoperationen (bis zu 2 Monaten)
- Augenlid-Haut

# Köpfe/Aufssätze:

für das Gesicht: 100, 150, 200

















für den Augenbereich: 200

für den Körper: 75




für schwer erreichbare Regionen: 150



# Bedienfeld

Wählen Sie "Microdermabrasion" aus dem Hauptmenü.

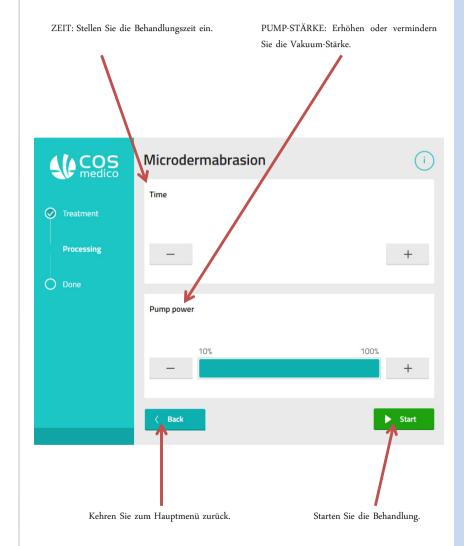

# Vorbereitung der Haut für die Behandlung mit der Mikrodermabrasion:

- Führen Sie 5 Tage vor der Behandlung keine Peelings, chemische Enthaarungen, Wachs oder andere Verfahren durch, die Hautirritationen verursachen können.
- Bräunen Sie die Haut an 7 Tagen vor der Behandlung nicht.
- Die Diamant Mikrodermabrasion wird als hervorragende Vorbereitung für kosmetische Operationen empfohlen, daher ist es am besten die Abfolge vor einem Eingriff zu durchlaufen.

Empfehlungen für die Pflege der Haut nach der Behandlung:

- -30 Tage nach der Behandlung sollten Sie die Haut nicht bräunen.
- Schützen Sie die Haut vor Sonnenlicht. Nutzen Sie Sunblocker über 3.
- Meiden Sie das Schwimmen in gechlortem Wasser und Sauna für mehrere Tage.
- Trinken Sie etwa 2 Liter Wasser am Tag.
- Befeuchten Sie Ihre Haut regelmäßig.

#### **ERINNERUNG**

- 1. Der Vakuum-Wert sollte berücksichtigt werden, wenn Sie den Durchmesser des Kopfes wählen.
- 2. Führen Sie die Mikrodermabrasion nicht auf den Augenlidern, der Schleimhaut und feuchter oder mit kosmetischen Präparaten bedeckter Haut durch.
- 3. Die Behandlung sollte schmerzfrei sein.
- 4. Nach einem Peeling kann Hautausschlag auftreten, welcher nach wenigen bis zu mehreren Stunden nach der Behandlung verschwindet, abhängig von der Empfindlichkeit der Haut.
- 5. Sorgfältig ausgewählte Präparate, die nach der Behandlung angewendet werden, können die Erholung der Haut merklich beschleunigen.

Die Auswahl des Kopfes und des Schleifmittels sollte gemäß dem Hauttyp und der persönlichen Eigenschaften erfolgen. Auch die Dicke der Haut und der Blutgefäße sollte berücksichigt werden.

# Skinic

Wenn Sie Zugang zur SKINIC-App auf Ihrem Chromebook haben möchten, folgen Sie bitte den 6 Schritten unten:

- 1. Schicken Sie Ihre Email-Adresse an Ihren Zulieferer.
- 2. Sie werden eine Einladung an Ihre Email-Adresse erhalten.
- 3. Klicken Sie auf den bereitgestellten Link.
- 4. Füllen Sie das Formular aus und clicken Sie auf "CREATE ACCOUNT" .
- 5. Gehen Sie zu www.skinic.eu.
- 6. Geben Sie Ihren Login bzw. das Passwort ein und klicken Sie "Sign in".

Genießen Sie die Verbindung.